

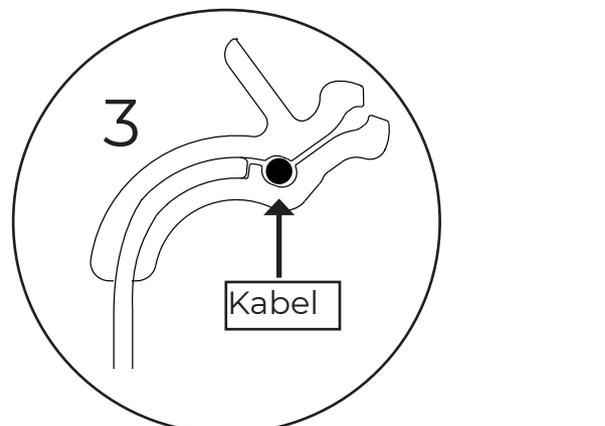
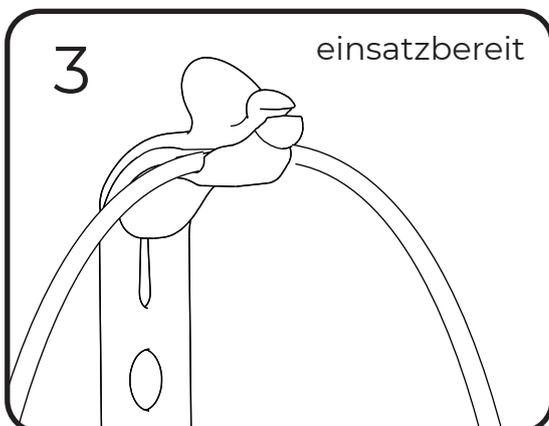
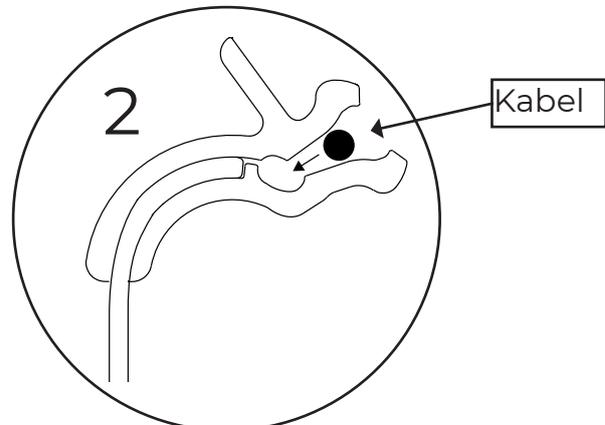
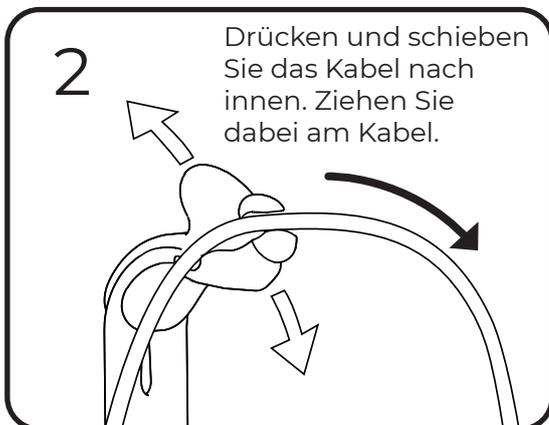


Installation

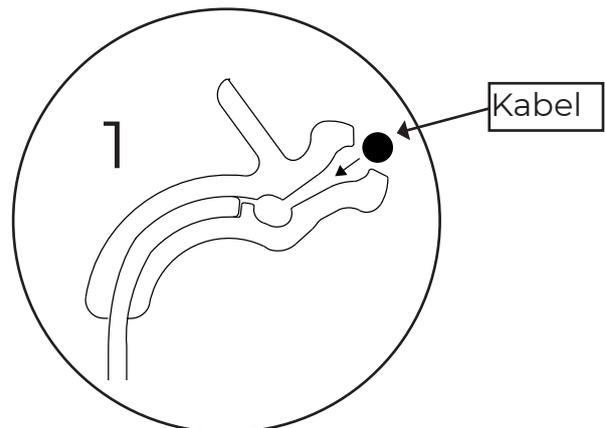


1. Öffnen Sie den Halter
2. Drücken und schieben Sie das Kabel nach innen. Ziehen Sie dabei am Kabel.
3. Prüfen Sie, ob das Kabel richtig installiert ist.


Dieser Installationsvorgang findet einmalig statt.
Nachdem der Sudl-Halter installiert ist, wird er Teil der Rufanlage und bleibt am Kabel befestigt.

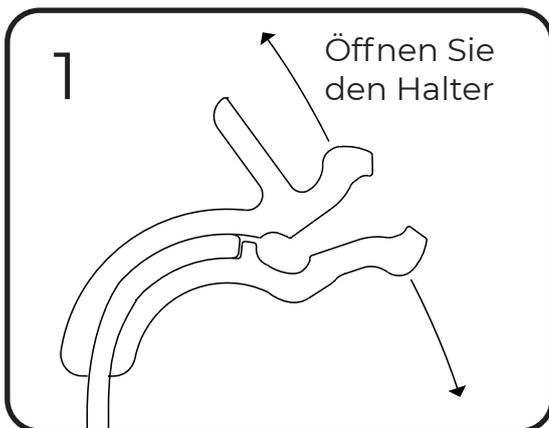

Gebrauchsanweisung

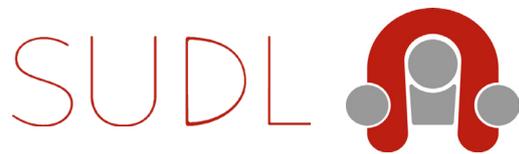


Infos

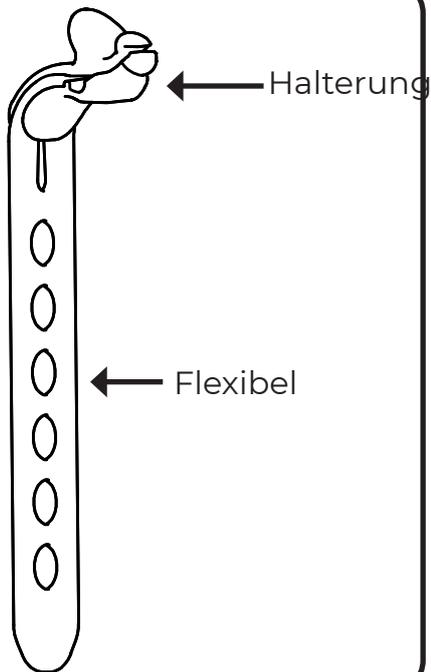


1

Setzen Sie den Halter (mit Kabel) auf die Schiene

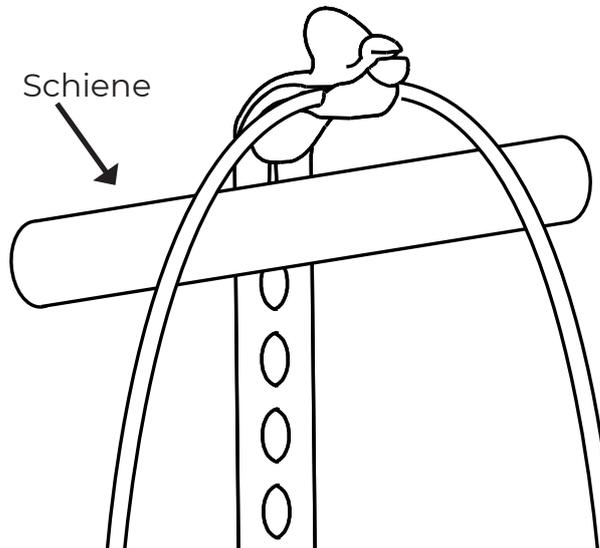

2

Verbinden Sie das Kabel mit dem Halter, um es an der Schiene zu befestigen.

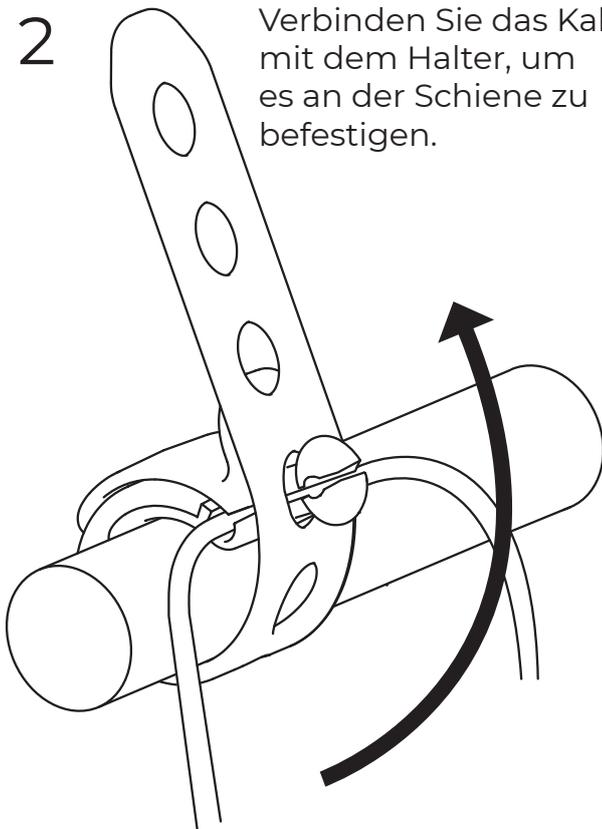

3

Schieben Sie das Kabel bei Bedarf in die Halterung. So bleibt das Gerät im Blick und in Reichweite. Es kann leicht angebracht und entfernt werden

