

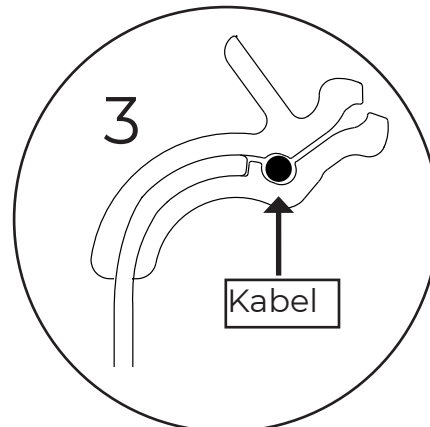
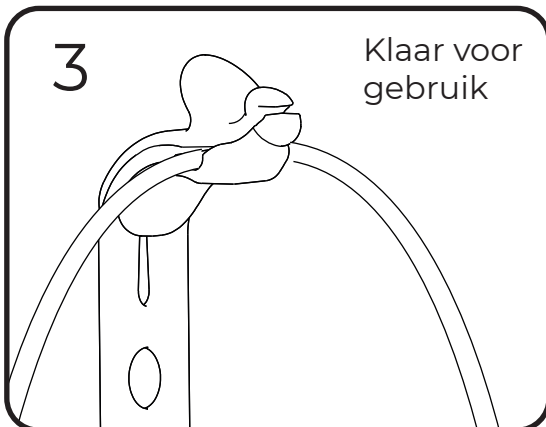
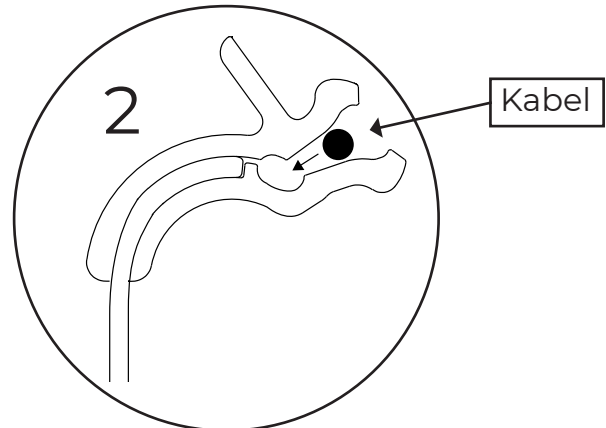
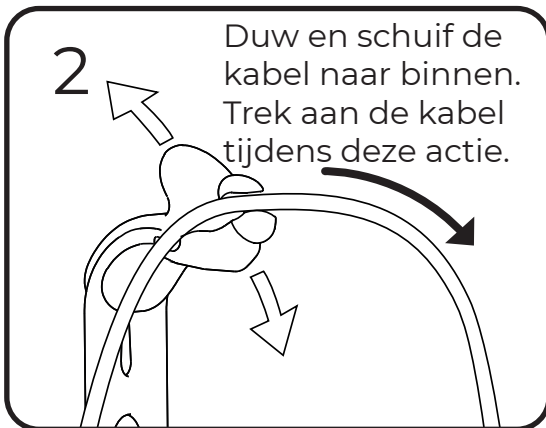


Installatie

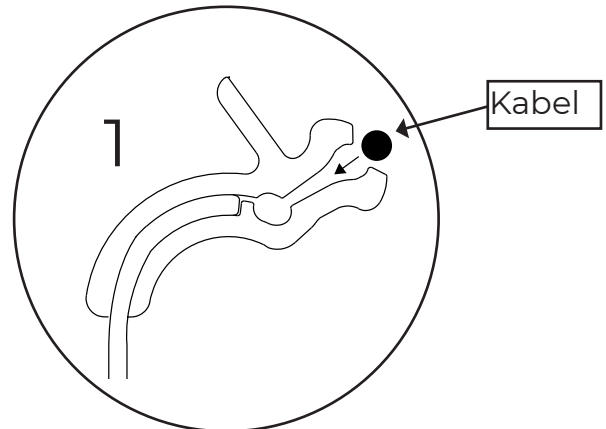

1. Open de houder
2. Duw en schuif de kabel naar binnen. Trek aan de kabel tijdens deze actie.
3. Controleer of de kabel correct is geïnstalleerd

Dit installatieproces vindt eenmalig plaats. Nadat de sudl-houder geïnstalleerd is, wordt hij een onderdeel van het oproepsysteem en blijft hij bevestigd aan de kabel.

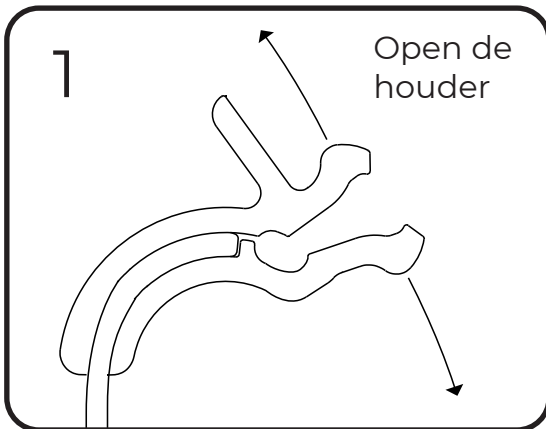


Handleiding

SUDL




Info

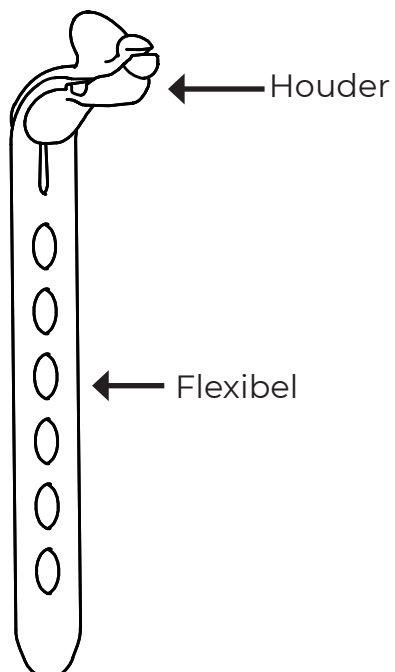


1

Plaats de houder (met kabel) over de rail.

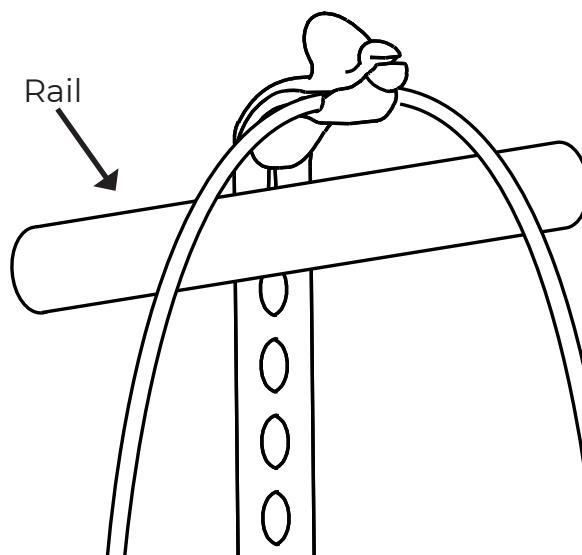


2

Verbind de flexibel met de houder om deze aan de rail te bevestigen.

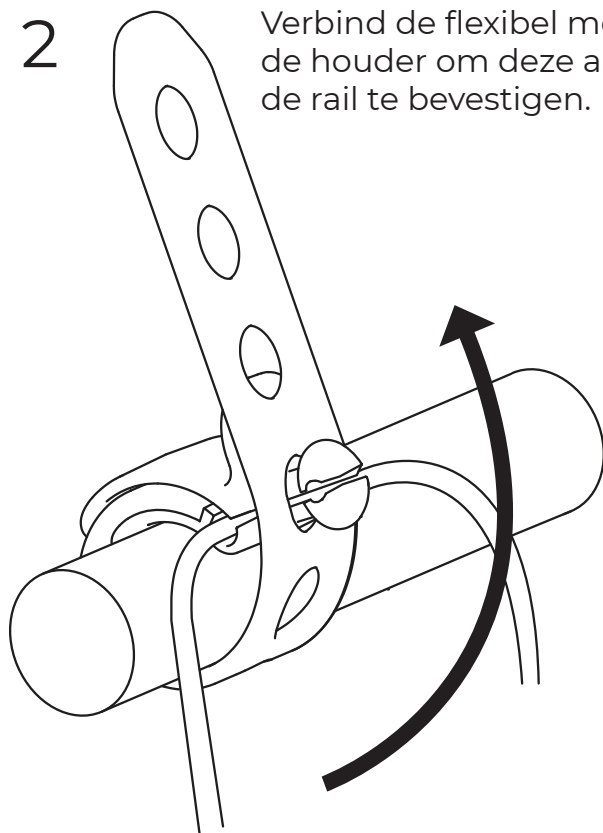

3

Duw de kabel indien nodig in de houder. Zo blijft het apparaat in het zicht en binnen handbereik. Het kan gemakkelijk bevestigd en verwijderd worden.

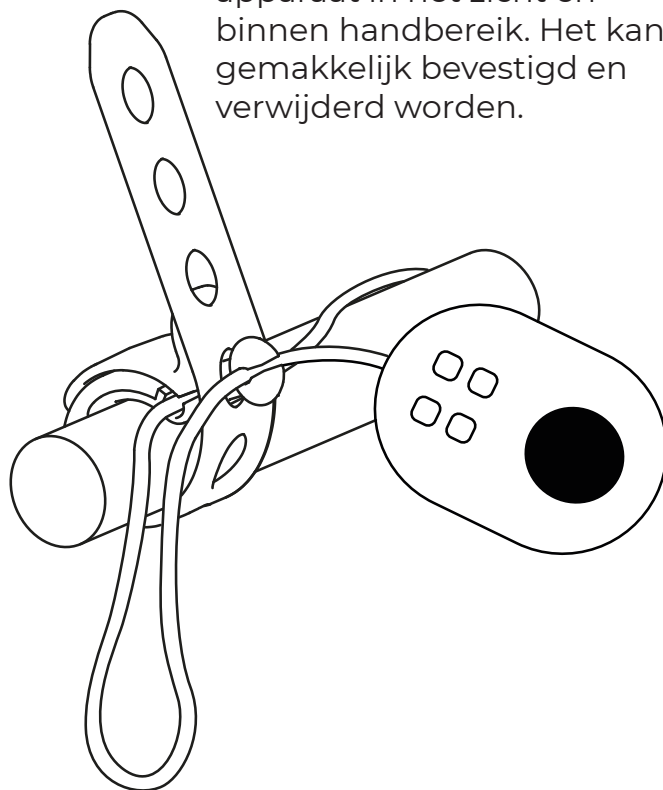

Handleiding

www.sudl.eu

Info@sudl.eu